



## UNIVERSAL COMFORT

Arnés acolchado con sujeción adicional alrededor de los muslos y la pelvis.

### USABILIDAD

- Para usuarios con mayor discapacidad u otras necesidades especiales.
- Para transferencias desde una posición sentada o tumbada.
- Para transferencias en grúas móviles y fijas..

### CARACTERÍSTICAS

- El arnés permite trasladar al usuario desde una silla de ruedas/silla o desde la posición de tumbado desde una cama o bañera.
- El arnés proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis, sujetando la parte superior del cuerpo y proporcionando al usuario una sensación de comodidad y seguridad.
- El arnés tiene cintas divididas para las piernas, que no se cruzan gracias a una cinta de cierre adicional. La tela de las piernas tienen una gran superficie acolchada que reduce la presión sobre todo el fémur.
- El arnés garantiza una buena postura erguida que facilita la colocación del usuario.
- El arnés de malla de poliéster es adecuado para el baño.
- El arnés tiene una pequeña abertura para el asiento.

### ESPECIFICACIONES

SWL: 275 kg

#### Material:

Polyester y malla poliester

Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL

### REFERENCIAS:

Universal Comfort, poliester

	Item no.
<b>XS</b>	009-09843
<b>S</b>	009-09844
<b>M</b>	009-09845
<b>L</b>	009-09846
<b>XL</b>	009-09847
<b>XXL</b>	009-09848


### Universal Comfort, MALLA POLIESTER

	Item no.
<b>XS</b>	009-09853
<b>S</b>	009-09854
<b>M</b>	009-09855
<b>L</b>	009-09856
<b>XL</b>	009-09857
<b>XXL</b>	009-09858



## GUÍA TALLAS DE ARNESES

- El arnés tiene una cinta de color en la parte superior de la espalda con la marca de la talla y la línea media, que garantiza la correcta colocación del arnés.
- El código de color aparece en la tabla de tallas.
- La imagen siguiente muestra un código de color amarillo, lo que significa que el arnés es de la talla M (mediana):

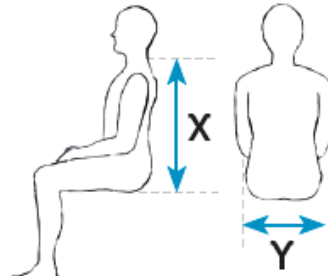

	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hip measurement)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (measurement from neck to lower back)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

### TIP!

Colocando las cintas de las piernas como se ilustra a continuación, el arnés también puede utilizarse para pacientes amputados:



Para más especificaciones, consulte el manual técnico. Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. WinnCare Nordic se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Las fotos de los productos pueden incluir accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener más información.

### PARA MAYOR INFORMACIÓN:

[winnCare.es](http://winnCare.es)

E-mail: [info@winnCare.es](mailto:info@winnCare.es)



WIN  CARE

