

À commander sur le site (30) Nîmes



3 ANOS GARANTIA

Score Escala de Braden



## INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda en la prevención de lesiones derivadas de la presión para pacientes **en grado MUY ALTO**.

Confinado a una silla de ruedas entre **8 y 10 horas al día**.

40 ≤ 200 kg



Funda



NORMATIVA DE FUEGO  
EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

IMF: ECJ020

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cojín de celdas de aire individualmente ajustable y deformable.
- Limita los efectos de la fricción y el cizallamiento.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Perfectamente adaptado a la morfología del paciente para la **prevención en las zonas de mayor riesgo** para los pacientes de alto riesgo
- ▶ Se adapta a TODAS las morfologías y puede **controlar y ajustar los desequilibrios pélvicos** para favorecer el posicionamiento correcto del paciente.
- ▶ Alto grado de movilidad para acompañar todos los movimientos del paciente.
- ▶ También disponible con **dos compartimentos** para compensar la asimetría del paciente.
- ▶ Reduce los efectos de la maceración al permitir que el aire circule entre las bases de las celdas

## TALLAS

- Correlaciona el peso y la altura del paciente en la matriz de Kinéris.
- Identifique el producto recomendado consultando el código de colores.
- Verifique que la anchura del asiento del cojín se adapta a la anchura de la pelvis del paciente.

**Ejemplo :** Paciente 1.55 m y 55 kg ▶ **cojín V497 o V4910**


## COMPARTIMENTO (S)

- Pacientes sin apoyo asimétrico: cojín Kinéris de un solo compartimento.
- Paciente con apoyo simétrico : cojín Kinéris bi-compartimento..

Añadir al final de la referencia « -1EL » para un cojín de un solo compartimento y « -2EL » para un cojín bi-compartimento. Los cojines Kinéris de referencias: V667, V6610, V677, V6710, V777, V7710 son exclusivamente mono-compartimento.

**Ejemplo :** Paciente 1.55 m y 55 kg, activo en la silla, sin apoyo asimétrico ▶ **cojín V497-1EL**

### MONO-COMPARTIMENTO

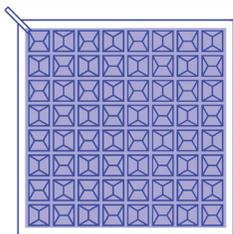


Mono-compartimento para usuarios sin problemas de estabilidad.



Mono compartimento 7 cm

### BI-COMPARTIMENTO

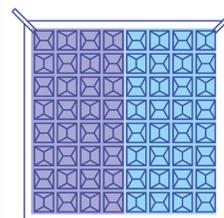

Bi-compartimento para usuarios con problemas de estabilidad.



Bi-compartimento 10 cm






# MATRÍZ KINERIS

Presión de inflado (valores en mmHg)

(mmHg = mm de mercurio)

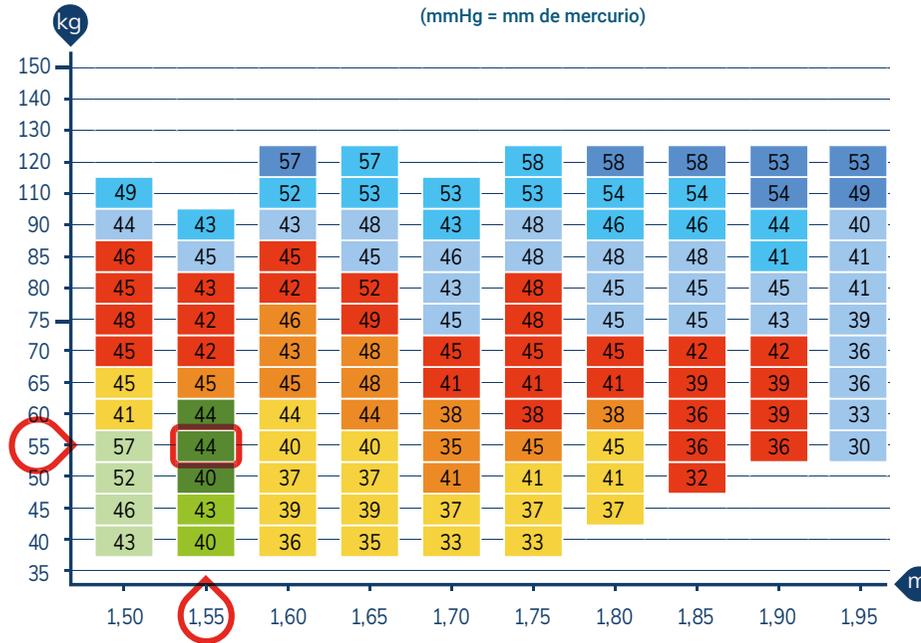

## Referencias

V367 V3610	V677 V6710
V427 V4210	V727 V7210
V497 V4910	V777 V7710
V567 V5610	V817 V8110
V667 V6610	V907 V9010
V647 V6410	V107 V1010

El prescriptor debe asegurarse de que el paciente o sus cuidadores son capaces de ajustar el soporte.  
El prescriptor debe recomendar una consulta al mes siguiente.

ALTURA DEL COJÍN 7 CM		ALTURA DEL COJÍN 10 CM		PESO PACIENTE KG	DIMENSIONES
MONO COMPARTIMENTO	BI COMPARTIMENTO	MONO COMPARTIMENTO	BI COMPARTIMENTO		
V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	40 a 55	28,5 x 28,5 cm
V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	40 a 45	28,5 x 33 cm
V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	50 a 60	33 x 33 cm
V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	40 a 65	33 x 37,5 cm
V667-1EL	-	V6610-1EL	-	50 a 75	36 x 36 cm
V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	50 a 75	37,5 x 37,5 cm
V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	50 a 85	37,5 x 42 cm
V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	55 a 90	42 x 42 cm
V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	85 a 120*	42 x 46,5 cm
V677-1EL	-	V6710-1EL	-	50 a 85	43 x 36 cm
V777-1EL	-	V7710-1EL	-	50 a 85	43 x 42 cm
V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	110 a 120*	46,5 x 46,5 cm

## KINÉRIS®

Funda integral extraíble  
Base antideslizante

\* Compatibilidad según consejo médico hasta 150 kg