



# GRÚA DE TECHO LUNA

SOLUCIONES DE ELEVACIÓN DE TECHO



PRODUCT EXPERTISE

THERAPEUTIC SOLUTIONS

SERVICE EXPERTISE



## GRÚA DE TECHO LUNA

### SOLUCIONES DE ELEVACIÓN DE TECHO

La elegante forma de la grúa Luna marca un hito en el innovador diseño escandinavo, lo que la convierte en la opción preferida para la asistencia domiciliar, el uso hospitalario u otros entornos sanitarios.

La Luna es una grúa de techo fija y portátil en una sola unidad, lo que proporciona una versatilidad inigualable.

Combine la Luna con una opción de rieles WinnCare para obtener un sistema eficaz y a la medida.



4	Grúa de techo Luna	14	Sistema de montaje
6	Modelos de Luna	16	Conectores de puerta
7	Características Principales	17	Mobile Flex
8	Mando y cargador	18	Luna Mover
9	Trolley	20	Perchas
10	Carriles	21	Perchas eléctricas

### Contáctenos:

Para más información y si prefiere, le hacemos una

**visita:**

[marketing@winncare.es](mailto:marketing@winncare.es)

[ventas@winncare.es](mailto:ventas@winncare.es)

Phone: +34 (0)9 61 56 55 21

[winncare.es](http://winncare.es)

[wearewinncare.com](http://wearewinncare.com)



EXPERIENCIA EN PRODUCTOS

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS



## GRÚA DE TECHO LUNA & SISTEMA DE RIELES

## Utilizada en todo el mundo.

Es utilizada en hospitales, residencias de mayores y en domicilios, las soluciones de grúas de elevación de techo WINNCARE, son la opción perfecta para equipos de manejo de pacientes mayores y con movilidad reducida.

## Cobertura total de la habitación.

Nuestros sistemas de elevación giran en torno a la grúa de techo Luna, es ligera, fácil de instalar y es la opción perfecta para cubrir una habitación.

## Satisfacer sus necesidades.

El sistema Luna se utiliza junto con una solución de rieles para combinar funcionalidad y estética, lo que la convierte en la opción ideal para las crecientes exigencias de seguridad en el sector sanitario, en constante evolución.

**5** LUNA  
AÑOS  
GARANTÍA

## SEGURIDAD & CONFIANZA

Debido a nuestra total confianza en el rendimiento fiable de Luna y en su trayectoria demostrada, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes una extraordinaria garantía del producto de 5 años.



# MODELOS DE LUNA

Grúa de techo fija y portátil: 200 or 275 kg con el mismo modelo de carga de elevación, y con sistema de desenganche rápido WINNCARE

Una característica verdaderamente única. Cambiar la Luna del modelo fijo al portátil pueden hacerse en segundos; con sólo desmontar y volver a colocar la unidad en el carril.

Para ahorrar tiempo y dinero, la Luna puede instalarse en cualquier sistema de rieles que ya tenga instalada. No obstante, siempre se recomienda contar con la evaluación y el asesoramiento de nuestros ingenieros expertos.




# LUNA TWIN

- Hasta 400 Kg de carga de elevación
- Diseño flexible. dos grúas de 275 kg puede convertirse en bariátrica; grúa de 400 kg en pocos minutos. Sin necesidad de utilizar herramientas.

## Características principales

- Capacidad de peso: de 200, 275 y 400 kg.
- Una Luna solo pesa 6.7 kg (sin perchas).
- Función de arranque y de parada suaves.
- Dos asas para montar la grúa.
- Sistema de bloqueo de seguridad con alarma.
- El carro de transferencia tiene ruedas neumáticas para un transporte silencioso.
- Superficies lavables.
- Mantenimiento rápido y sencillo – solo toma pocos minutos.
- Todas las funciones pueden ser controladas a través del mando (mas información en la pág: 10)

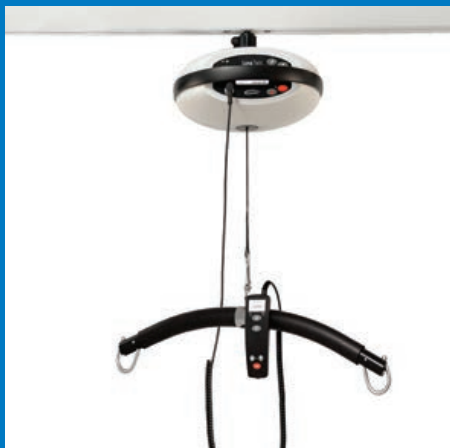

Una simple Luna TWIN 275 kg



2 Lunas en 1: Luna Twin 400 kg

# 2 LUNAS EN 1 TWIN!

Aquí te explicamos como pasar de 275 a 400 kg en 5 minutos sin utilizar herramientas!

1



- Fije la barra distanciadora entre las unidades.
- Monte las unidades Luna en el carril y asegúrese de que ambas correas tienen la misma longitud.
- Conecta el cable doble a las unidades.

2



- Fije la percha en las correas.
- Si es necesario, ajuste la altura de la correa con el mando pulsando hacia la derecha o hacia la izquierda.

3



- Fije la percha con el sistema de bloqueo rápido.
- Ahora tienes una solución bariátrica - rápida y fácil!



# MANDO Y CARGADOR DE LA LUNA

## Principales ventajas

- El mando de la Luna tiene un diseño ergonómico y una funcionalidad excepcional.
- El cargador de la Luna se puede montar en cualquier tipo de pared. Esto garantiza una estación de carga permanente y estable.
- El cargador de la Luna también se puede montar en otros productos, como los sistemas Luna Trolley o Mobile Flex de 2 y 4 pórticos.

- Luna se carga a través del mando (con indicador de carga)
- Todas las funciones pueden controlarse a través del mando, incluida la parada de emergencia.

2. El mando manual está equipado con: pulsadores (no de membrana) y percha elástica

## Principales características

1. IPx4 conector con cierre de rosca: Un mecanismo seguro y fiable para conectar el mando manual a la grúa Luna. También disponible en IPx7



QR y podrás ver el vídeo, la ficha de producto, la guía rápida o el manual de usuario de Luna





# LUNA TROLLEY

## Sistema de carro portátil para unidad Luna

Usar la grúa de techo Luna en modo portátil permite una flexibilidad sin precedentes en situaciones de traslado de pacientes, tanto en las residencias de mayores como en entornos de asistencia domiciliaria.

La Luna Trolley es un medio rápido, eficaz y práctico de trasladar la grúa de techo portátil Luna de una habitación a otra. Con Luna Trolley, no hay

necesidad de que el cuidador lleve la grúa de techo de una habitación a otra. La grúa Luna Trolley, que se desplaza suavemente, hace el trabajo por usted.

El carro Luna Trolley proporciona al cuidador una solución portátil completa: una cuna para sujetar firmemente la grúa de techo Luna en su sitio, un práctico cargador a bordo, una bolsa para la correa Luna y el gancho de sujeción, y

un útil bolsillo para llevar arneses o documentos. En resumen, una práctica ayuda para el perfecto aterrizaje Luna.



## RIELES O CARRILES

Sistemas de rieles para **Luna**: un mundo de vías flexibles, robustas y fáciles de instalar. **Winncare** ofrece múltiples soluciones de rieles para adaptarse a las variadas y exigentes necesidades del sector sanitario actual. Todos los rieles son de aluminio con recubrimiento de polvo de larga duración.

- El riel de perfil bajo de 75 mm, pequeño y resistente, se ha diseñado pensando en la baja altura, las distancias óptimas entre vanos y la facilidad de instalación.
- El peso ligero de la guía de 135 mm oculta su resistencia. Este riel tiene la mayor distancia entre ejes de todos los rieles de Luna y puede utilizarse como riel transversal junto con el exclusivo sistema de **conexión de puertas**.. Gracias a su superficie y bordes lisos, el riel de 135 mm es muy fácil de limpiar.

La grúa Luna se desmonta fácilmente del carro mediante un giro en sentido contrario a las agujas del reloj, como una bombilla.

A diferencia de otros sistemas de grúas de techo, una sola persona puede cambiar la Luna mediante el exclusivo sistema de entrelazado. Esto ahorra tiempo y facilita del mantenimiento y las reparaciones.

Con el sistema Luna, el dispositivo de elevación cuelga de un carro y sólo el carro se sitúa dentro del raíl. Esto significa que la unidad de elevación Luna se desmonta fácilmente, por lo que es un gran argumento de venta.

## RIEL EMPOTRADO

**NUEVO!** La última incorporación a nuestra ya extensa gama de raíles de techo es un perfil de riel de 75 mm empotrado. El perfil de carril empotrado se monta en el techo quedando enrasado con la superficie del techo. Este elegante perfil suele ser la opción preferida por los arquitectos para entornos de construcción específicos, tanto para sistemas de vía única como de vía **en H**.






## E-track

Con una profundidad de sólo 25 mm, E-track es un atractivo panel de pared plano y una alternativa discreta a los antiestéticos soportes de pared y techo que se utilizan convencionalmente. E-track se integra estéticamente en cualquier ambiente y puede montarse fácilmente en cualquier tipo de pared.


E-track se instala de forma rápida y sencilla, por lo que es una opción muy rentable y la preferida por los usuarios y

elección de los profesionales para los entornos domiciliarios o residenciales. E-Track es también un sistema sumamente flexible.


por ejemplo: una habitación puede ser completada con E-Track y un sistema transversal, pero si el sistema transversal no se utiliza o se necesita en otra sala, el sistema puede desmontarse rápida y fácilmente de los perfiles E-track y trasladarse cómodamente en cuestión de minutos.

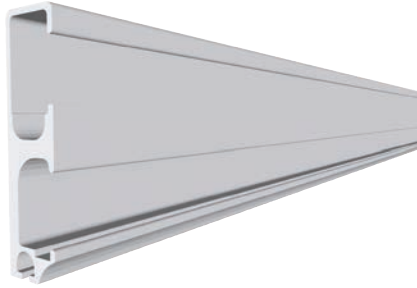


**E-track**

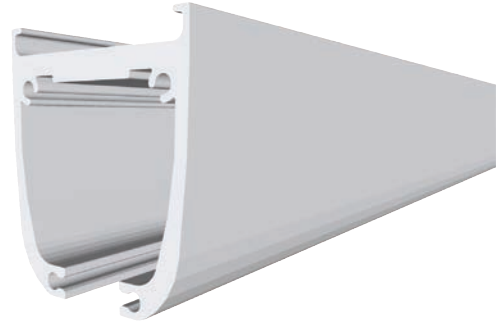

**riel de 75 mm**

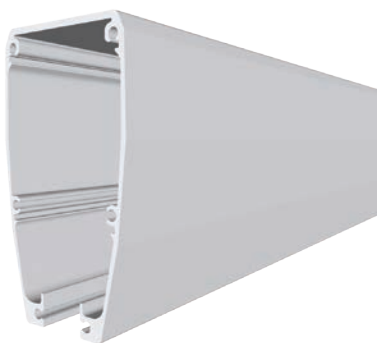

**riel de 135 mm**

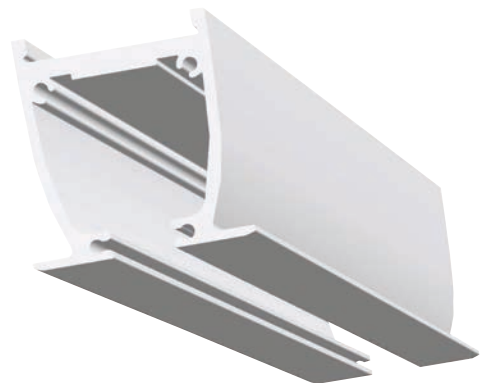

**Riel empotrable**

# EJEMPLOS DE SISTEMAS DE MONTAJE DE PARED Y DE TECHO

Winncare ofrece una amplia gama de sistemas de rieles de techo, rieles rectos y curvos, rotondas giratorias electrónicas y cambiadores de rieles, que pueden instalarse fácilmente en diversas configuraciones para adaptarse a las exigencias de cada situación individual.



## Rieles de pared únicos

El exclusivo E-Track de Winnicare, montado en la pared, se integra discretamente en el entorno asistencial y está transformando la forma en que se realiza el recorrido aéreo. Una alternativa elegante a los molestos soportes convencionales de pared y techo.

## Visualicémoslo para usted

Nuestro experimentado equipo interno de ingenieros está preparado para desarrollar una propuesta de elevación y recorrido en forma de dibujo o animación con el fin de visualizar las opciones de un proyecto concreto.





## CONECTORES DE PUERTAS

Si necesita trasladar pacientes de una habitación a otra, por ejemplo, del dormitorio al cuarto de baño, nuestro conector de puerta es una solución sencilla y fiable, que además reduce el número total de elevaciones necesarias. Menos elevaciones crean un mejor entorno de trabajo para el cuidador y un traslado más seguro para el paciente.

El conector de puerta Luna, como solución de montaje en pared, es la opción preferida por arquitectos y constructores, debido a su diseño elegante y compacto.

El conector de puerta es adecuado para la mayoría de anchuras de pared (mín. 300 mm). Y como se monta muy cerca de la superficie de la pared ocupando poco espacio en la habitación, se aprovecha al máximo la superficie de cobertura de la habitación deseada.

El conector de la puerta es muy corto en comparación con otras soluciones similares del mercado y no requiere costosos

cambios en el sistema eléctrico del edificio, ya que se acciona manualmente.

El bloqueo y desbloqueo del conector de la puerta se realiza simplemente tirando ligeramente de la cuerda. Cuando el conector de la puerta está desbloqueado y el travesaño está alineado con el mecanismo, el sistema se bloquea automáticamente, listo para la transferencia de habitación a habitación. Para desbloquear tire del cordón.



## Mobile Flex 2

Adecuada para personas que necesitan una solución de elevación inmediata y/o temporal que pueda montarse, utilizarse y desmontarse de forma fácil y sencilla. El Mobile Flex es fácil de montar. No se necesitan herramientas para ajustar la altura y la anchura y proporcionar soluciones temporales fiables.

El ajuste de la altura mediante resorte se realiza en tan solo unos segundos, lo que proporciona un uso inmediato para el cuidador y el cliente. Los rieles telescópicos proporcionan una altura de elevación suficiente para ofrecer soluciones adecuadas para la mayoría de las habitaciones y la mayoría de las situaciones de transferencia.

El Mobile Flex cuando se combina con la innovadora grúa de techo Luna, es un sistema de elevación sencillo y funcional y la opción ideal tanto para asistencia domiciliaria como para uso residencial

Mobile Flex proporciona una capacidad de elevación de hasta 275 kg, utilizando así todo el alcance de la grúa de techo Luna.

### Mezclar y combinar

Quizá sólo necesite un sistema de 2 postes sobre una cama, o quizá necesite cubrir toda la habitación con un sistema de 4 postes.

Sean cuales sean sus necesidades, Mobile Flex es su solución flexible, cuyas piezas modulares pueden encajarse y combinarse según su propósito.



### sistema de 2 postes

Alto & ancho ajustables

Solo toma 30 minutos para montar o ensamblar



### sistema de 4 postes

Totalmente ajustable, habitación cubierta e independiente

Solo toma 1 hora para montar o ensamblar



# LUNA MOVER - CASETE DE TECHO MOTORIZADO

## EL NUEVO COMPAÑERO DE LUNA

La innovadora grúa de techo Luna, con su exclusivo diseño danés y su excelente funcionalidad, tiene ahora un nuevo compañero: **Luna Mover**.



**El conocido mando manual con flechas que indican la dirección de transferencia**



**El asa de liberación de seguridad integrada patentada permite la transferencia manual en caso necesario**



**Fácil montaje de la grúa de techo Luna en el Luna Mover montado en el riel.**

Luna Mover permite al cuidador mover sin esfuerzo la grúa de techo Luna horizontalmente a lo largo del riel utilizando el mando manual, independientemente del peso del paciente o del tamaño del cuidador.

Luna Mover también es útil en situaciones en las que el cuidador desea detener la grúa de techo Luna en un punto específico si el cuidador, por alguna razón, necesita asistencia eléctrica para mover al paciente por el riel.

En un entorno de asistencia domiciliaria, Luna Mover también ofrece a los usuarios la ventaja de una mayor independencia. Si un usuario puede colocarse el arnés de forma independiente, puede, mediante las funciones de control manual, trasladarse por sí mismo, por ejemplo, de la cama a la silla.

Luna Mover se alimenta y controla mediante la grúa de techo Luna, lo que significa que no hay cables de carga adicionales. Simplemente conecte las dos unidades con el cable suministrado. También está equipado con un sistema de seguridad pendiente de patente que, en caso necesario, puede desbloquearse utilizando el asa de desbloqueo de seguridad integrada. Una vez desbloqueado, Luna Mover puede desplazarse manualmente por el riel.

El Luna Mover está fabricado con el mismo alto nivel de funcionalidad y diseño que nuestro Luna IPx4 clásico, por lo que cuenta con una garantía exclusiva de 5 años.



# PERCHAS

Un completo rango de perchas en varios tamaños y modelos, para adaptarse a todas las necesidades asistenciales y situaciones de traslado. Todas las perchas están equipadas con nuestro sistema patentado de gancho de arneses.

La percha de 2 puntos es adecuada para una transferencia estándar. Está disponible en 3 anchos.

Como la exclusiva barra separadora de 3 puntos en forma de V. Esto aumenta la distancia entre la sección de la correa del hombro y la sección de la correa de la pierna, abriendo el arnés para una elevación más cómoda.

En otras situaciones será más adecuado utilizar una de nuestras soluciones de percha de 4 puntos. Disponemos de 2 tipos diferentes.

La más grande es la solución H con 4 puntos colocados equitativamente desde el centro para una distribución óptima del peso. También existe una opción más flexible en la que se utiliza una percha estándar de 2 puntos y luego se añaden 2 perchas laterales adicionales a los 2 puntos finales.

Luego hay una percha flexible de 4 puntos que se ajusta de serie a la anchura de hombros y caderas.

Utilizando percha de 3 puntos o una de las de 4 puntos, tendrá una transferencia más abierta y flexible, que tiene en cuenta las necesidades especiales de los clientes.

## Principales funciones estándar

- Amplia gama para uso específico y uso general
- Ganchos para arneses patentados en todas las perchas.
- Fácilmente intercambiables para permitir un uso múltiple
- Puede utilizarse tanto en elevadores móviles como en grúas de techo.



# PERCHAS ELÉCTRICAS

Capacidad de carga:  
**275 kg**

La nueva percha eléctrica patentada, única en su género, para grúas de techo.

La percha eléctrica puede girar 360° sin torcer ni enredar la correa y los cables.



## ¡Una solución flexible, todo en uno!

La percha eléctrica ofrece muchas posibilidades y proporciona una flexibilidad en la transferencia, lo que permite mover al cliente desde una posición casi tumbada a una sentada sin cambiar de percha.

Puede ayudar a facilitar la colocación del cliente en la silla, para las transferencias de la cama a la silla.

Al mismo tiempo, la percha eléctrica ofrece la oportunidad de garantizar un ángulo correcto para el paciente durante toda la transferencia, a fin de tener en cuenta de forma óptima la necesidad del paciente de abrir el ángulo del asiento. También proporciona al cuidador una buena oportunidad de mantener el contacto visual con el cliente.

La percha eléctrica debe utilizarse con un arnés especial con pinzas.

# BÁSCULA DE PESO

Nuestras básculas han sido aprobadas clínicamente.

La capacidad de peso es de hasta 300 kg y se utiliza para nuestras grúas de techo Luna de 200 y 275 kg. Las básculas tienen una precisión de 0,1 kg.

Ambas básculas tienen una gran pantalla y múltiples funciones, incluido el botón On/Off/Zero y el botón Hold. (encendido/apagado y en Espera)

Con la función Hold es posible mostrar de 5 a 10 series de lecturas y analizar la discrepancia.

La función de tara permite restar peso adicional, como ropa, del peso total.

También podemos proporcionarle una báscula de 400 kg para la solución Luna Twin.



Balanza de peso para la grúa de techo Luna



Balanza de peso con doble percha

## BÁSCULA CON DOBLE PERCHA

La doble percha es la solución perfecta si lo que busca es una solución portátil muy flexible, que pueda instalarse en prácticamente cualquier grúa móvil o de techo de cualquier fabricante.

Además, la correa y el soporte de montaje son fáciles de usar y se pueden ajustar en anchura para adaptarse a diferentes tamaños de perchas.

Con ganchos de bloqueo en cada extremo, eliminando cualquier posibilidad de que los lazos del arnés se suelte, una gran característica cuando se eleva a una persona activa en un arnés.

La capacidad de carga es de hasta 300 kg





## ¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Si tienes preguntas o dudas de algunos de los productos indicados en este catálogo o te gustaría conocer más acerca de las soluciones que ofrece Winncare en: elevación , higiene, camas, colchones y cojines? No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

**Contáctanos hoy.**

**Para mayor información visita:**

winncare.es

E-mail: [info@winncare.es](mailto:info@winncare.es)

Phone: +34 (0)9 61 56 55 21

**Estaremos encantados de conocerle.!**





Grúa de techo Luna / Sistema Mobile Flex / Báscula de peso / Luna Mover / Sistema de rieles.

[info@winncare.es](mailto:info@winncare.es)

[ventas@winncare.es](mailto:ventas@winncare.es)

[marketing@winncare.es](mailto:marketing@winncare.es)

[wearewinncare.com](http://wearewinncare.com)

WIN  CARE

