

GUÍA RÁPIDA

GRÚA DE TECHO LUNA



RECUERDA
COLOCAR SIEMPRE EL
MANDO EN EL CARGADOR
DESPUÉS DE UTILIZARLO



Bateria

- 100%
- 50%
- DEBE CARGARSE

Elevar

Descender

Resetear

Si el botón Resetear parpadea Pulse Resetear durante 5 segundos y la grúa volverá a funcionar.

Parada de emergencia

Después de presionar **STOP**, Para volver a activar el mando, hay que pulsar la tecla Resetear durante 5 segundos.



Para que la grúa funcione, el mando debe estar siempre conectado.


BAJADA DE EMERGENCIA

Utilicelo en caso de que no funcione el botón ELEVAR y el botón de DESCENDER; Pulse el botón del paracaídas durante el descenso, que se iniciará al cabo de 5 segundos.

"al pulsar el botón del paracaídas Oirá un "bip" constante .

Si la bajada de emergencia eléctrica no funciona, utilice la bajada de emergencia manual:

- 1- Tome la llave de la parte superior del cargador.
- 2- Retire el mando manual.
- 3- Retire el tapón del lateral de la Luna.
- 4- Coloque la llave en la Luna.
- 5- Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar al usuario.

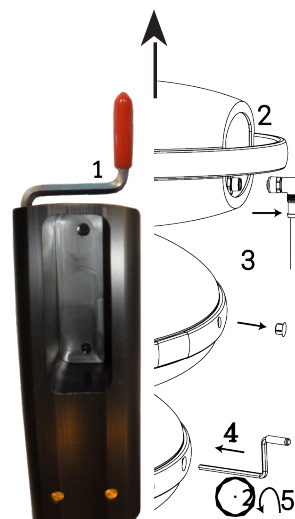

kg SWL 275 kg

Quickguide til Luna IPx4 / Version 12

WIN CARE

wearewinncare.com