



GUÍA DE SELECCIÓN DE COLCHONES

**SIN RIESGO DE LPP
NULO BAJO A MEDIO**
Reposo en cama < 15 h al día

- Paciente con dificultad para moverse
- Ningún trastorno neurológico importante
- Sin enfermedad arterial
- Estado general bueno a regular

COLCHÓN ESTÁTICO

Frecuencia de los cambios de posición
≥ 8 veces al día

NO LPP

CON LPP

ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA

HEBERGEMENT 30 ≤ 130 kg EPSUS 30 ≤ 120 kg APLOT 40 ≤ 120 kg

**RIESGO DE UPP MEDIO
A ALTO**
Reposo en cama ≤ 15 h al día
Paciente levantado durante el día

COLCHÓN ESTÁTICO

Frecuencia de los cambios de posición
≥ 6 veces al día

ANTECEDENTE UPP

CON UPP
GRADO 1 a 2 o 1 UPP de GRADO 3 a 4

ANCHURA 90

ANCHURA 90

COLCHÓN ESPECÍFICO

ESPUMA VISCOELÁSTICO

ALOVA VMA62 30 ≤ 120 kg ALOVA VMA63 30 ≤ 150 kg ALOVA VMA64 30 ≤ 180 kg VITA FORM 4 40 ≤ 150 kg NOVA FORM HORS STANDARD 30 ≤ 160 kg ALOVA JUNIOR 15 ≤ 70 kg ALOVA XXL 135 ≤ 270 kg



Prescripción y uso⁵

Quando se utilice para ayudar a tratar las úlceras por presión, debe combinarse con dispositivos de alivio localizado o de posicionamiento. En su caso, puede combinarse con la intervención de auxiliares médicos.



(EN) COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO

Frecuencia de los cambios de posición
3 veces al día

1 LPP en zona de apoyo

GRADO 1 a 4

MÚLTIPLES ESTRATOS

UNIMAT 30 ≤ 140 kg ROTAMAT 30 ≤ 140 kg

AUTOMÁTICO

aktair one plus 30 ≤ 165 kg aktair automorpho plus 30 ≤ 180 kg

RIESGO DE UPP ALTO
Reposo en cama ≤ 24 horas / 24
Pacientes en mal estado general y/o con arteriopatía de los miembros inferiores y/o un trastorno neurológico grave reciente.

COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO

Frecuencia de los cambios de posición
3 veces al día

VARIAS UPP
GRADO 1 a 4
en la zona de apoyo

AUTOMÁTICO

aktair automorpho cenzor 30 ≤ 165 kg AT-12 30 ≤ 180 kg AT-15 & DV 30 ≤ 200 kg AT-20 aktair XXL 100 ≤ 270 kg